

VIRUCIDAL

VAH

RKI/DVV

IHO

CE 0482



CLEANISEPT® WIPES forte

Μαντηλάκια χωρίς αλκοόλ για την απολύμανση
υπερήχων

- για την απολύμανση των υπερήχων για
διακολπικές εξετάσεις
- ιοκτόνο acc. EN 14476
- σύντομος χρόνο επαφής: 2 λεπτά

approved by

ESAOTE | SIEMENS
BK ULTRASOUND | UNISENSOR

ιοκτόνο + σποριοκτόνο σε
120 δευτ.

Έτοιμα προς χρήση μαντηλάκια απολύμανσης χωρίς αλκοόλ, ιοκτόνα και σποριοκτόνα για την ταχεία απολύμανση μικρών επιφανειών. Τα **CLEANISEPT® WIPES forte** μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από το κουτί, ξεχωριστά και γρήγορα ώστε να είναι έτοιμα για χρήση. Το υγρό απολυμαντικό είναι χωρίς αλκοόλ και χωρίς αλδεϋδες ή φαινόλες. Είναι ιδανικά για ανιχνευτές υπερήχων που έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους.

Πεδίο εφαρμογής

Acc. to Medical Device Directive (MDD):

Απολύμανση και καθαρισμός για ευαίσθητες ιατρικές συσκευές όπως ανιχνευτές υπερήχων για διακολπικές εξετάσεις.

Εφαρμογή

Σκουπίστε τις επιφάνειες με το έτοιμο προς χρήση μαντηλάκι μέχρι να υγρανθεί εντελώς. Μετά την παρέλευση του χρόνου επαφής, ξεπλύνετε τους υπερήχους καλά με νερό.

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες

- βακτηριοκτόνο incl. MRSA
- μυκητοκτόνο
- ιοκτόνο (incl. polio-, adeno-, papova/polyoma-, vacciniavirus as well as HBV/HIV/HCV/influenzavirus)
- σποριοκτόνο (C. Diff.)

Σύνθεση

Δραστικές ουσίες σε 100g υγρού διαλύματος: 0.2 g didecyldimethyl ammonium chloride; 0.4 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammoni-umchloride

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες			2 λεπτά
Βακτηριοκτόνο και μύκητες			
Συστατική εφαρμογή για απολύμανση επιφανειών (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	VAH**	μηχανική δράση για μολυσμ. συνθήκες	•
Συστατική εφαρμογή για απολύμανση επιφανειών (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμ. συνθήκες	•
Σποριοκτόνο (Clostridium difficile)	EN 13704	καθαρές συνθήκες	•
Ιοί			
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περίβλημα και ιούς χωρίς περίβλημα	RKI/DVV		•
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περίβλημα και ιούς χωρίς περίβλημα *	EN 14476/ prEN 16777	καθαρές και μολυσμ. συνθήκες	•
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test			
Δραστικό κατά των ιών δαμαλτίδας (MVA)	prEN 16777		•
Δραστικό έναντι αδενοϊών	prEN 16777		•
Δραστικό έναντι νοροϊών (MNV)	prEN 16777		•

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)

** Παρατίθενται σε 5 λεπτά στη στήλη του πίνακα VAH

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Διαστάσεις	Κωδικός
Δοχείο	12	100 μαντ.	14 x 20 cm	141.112.100

Να χρησιμοποιήτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.
Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.



Health supplies since 1988

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ Σ. Ο.Ε
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέκα 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα
Τηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089
Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr

